

Názov osobného ochranného prostriedku:**CZECH ROYAL PROTECTION RESPIRÁTOR FFP2****Názov a adresa výrobcu:** QCS Automotive s.r.o.,

Náměstí Svaté Trojice 157/12, 746 01 Oprava, Česká republika

Určené použitie: Účelom respirátora je chrániť používateľa filtrovaním vdychovaného vzduchu a obmedziť prenos infekcie medzi osobami. Účinnosť filtrácie je $\geq 95\%$. Jedná sa o jednorazový prostriedok.

Typ: filtračná polomaska proti časticiam EN149:2001+A1:2009**Účinnosť:** FFP2 NR

CZECH ROYAL PROTECTION RESPIRÁTOR FFP2 je osobný ochranný prostriedok podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch. Osobitnú pozornosť treba venovať výstražným nápisom.

Návod na použitie:

Prostriedok nasadzujte len čistými rukami. Pred použitím treba skontrolovať všetky súčasti respirátora, či nie sú poškodené. Používajte obe ruky.

1. Rozbalte respirátor a uchopte ho za bočné gumičky.
2. Respirátor si nasadte na tvár tak, aby vám zakrýval nos a ústa a končil pod bradou.
3. Bočné gumičky prichyťte za ušami.
4. Pomocou prstov skontrolujte a utiahnite svorku priliehajúcu k nosu.
5. Skontrolujte po obvode respirátora, či dobre prilieha k tvári.

Ilustračný obrázok návodu na použitie:

**Kontrola tesnosti a nasadenie:**

1. Prednú časť respirátora zakryte oboma rukami - dávajte pozor, aby ste nezmenili polohu respirátora.
2. Prudko vydýchnite.
3. Ak vzduch prechádza okolo nosa, upravte tvar nosovej svorky. Opätovne skontrolujte tesnosť nasadenia podľa vyššie uvedeného návodu.
4. Ak vzduch uniká okolo okrajov polomasky, upravte bočné úchyty okolo uší, kým sa vníkanie vzduchu neodstráni. Skontrolujte tesnosť nasadenia podľa návodu uvedeného vyššie.
5. Ak respirátor správne nesedí, respirátor vymeňte a nepoužívajte pôvodný respirátor.
6. Ak vzduch nepreniká, môžete použiť respirátor.

Pre lepšiu tesnosť použite spojku s pripnutím za hlavou.

Pokyny na skladovanie:

Chráňte pred slnečným žiarením a vlhkosťou.

Upozornenie:

- Vždy sa uistite, že výrobok je kompletný, správne nasadený a nosený počas celej expozície.
 - Tento výrobok nechráni pred plynmi/výparmi.
 - Nepoužívajte tento výrobok ako ochranu pred atmosférickými kontaminantmi, ktorých koncentrácia nie je známa alebo sú bezprostredne nebezpečné pre zdravie alebo život.
 - Nepoužívajte, ak máte bradu alebo iné ochlpenie na tvári, ktoré by mohlo zabrániť tesnému prilnutiu medzi tvárou a ochranným prostriedkom.
 - Tento prostriedok nevyklučuje riziko nákazy alebo infekcie.
 - Akýkoľvek závažný incident, ku ktorému dôjde v súvislosti s týmto prostriedkom je potrebné nahlásiť spoločnosti QCS Automotive s.r.o. a príslušnému miestnemu kontrolnému úradu.
 - Zničte a vymeňte CZECH ROYAL PROTECTION RESPIRÁTOR FFP2, keď je kontaminovaný krvou alebo inými infekčnými kontaminantmi, keď je poškodený, keď sa sťažuje dýchanie. Po ukončení jeho používania zabezpečte jeho likvidáciu v súlade s požiadavkami pokynov na likvidáciu nebezpečného infekčného materiálu.
 - Tento výrobok je určený len na jednorazové použitie. Jeho opakované použitie môže spôsobiť krížovú kontamináciu, ohroziť bezpečnosť používateľov a zhoršiť celkový výkon výrobku.
- Kontaminované výrobky sa musia likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Neupravujte, nečistite ani neopravujte tento prostriedok.
- Tento výrobok nie je ohňovzdorný. Nepoužívajte v priamom kontakte s otvoreným ohňom.
 - Nepoužívajte v prostredí s obsahom kyslíka nižším ako 19,5 % (definícia spoločnosti QCS Automotive s.r.o.; niektoré krajiny môžu mať vlastné definície nedostatku kyslíka; ak nie ste si istí vyhľadajte odbornú pomoc).

Nedodržanie vyššie uvedených pokynov alebo nesprávne zaobchádzanie s prostriedkami na ochranu dýchacích ciest počas pobytu používateľa v kontaminovanom prostredí môže mať nepriaznivé účinky na zdravie a viesť k vážnym ochoreniam.

Mesiac, rok výroby a dátum expirácie výrobku sú uvedené na obale výrobku.

Dátum poslednej revízie návodu na použitie: 2021-01-01