

FOREX - SK, s.r.o.
Jiráskova 12
984 01 Lučenec
Slovenská republika

36 051 918 : IČO
SK 2021625474 : IČ DPH
+421 47/4330044 : tel
+421 47/4331283 : fax
forex@forex.eu.sk
www.forex.eu.sk

NÁVOD NA POUŽITIE

Názov výrobku: **Rúško jednorazové 3-vrstvové, chirurgické SUNSMED**

Jednorazové 3-vrstvové chirurgické rúško zabraňuje prenášaní nákazy z chorého (nakazeného) človeka do okolia. Je to osobný ochranný prostriedok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch.

Používa sa pri ochoreniach dýchacích ciest, kvapôčkovej infekcii, chrípke atď. Pre obmedzenie šírenia nákazy nachádza uplatnenie v širokej verejnosti. Uchytáva sa gumičkami okolo uší. Použitie ochranného prostriedku je na jedno použitie. Životnosť jednorazových rúšok je zvyčajne približne dve hodiny.

AKO POUŽÍVAŤ RÚŠKO?

1. Pred nasadením rúška si vyčistíte ruky – použite dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu, alebo si umyte ruky mydlom a vodou.
2. Chyťte gumičky a dajte si ich cez uši, drôtik na nos je otočený smerom nahor.
3. Uistite sa, že rúško zakrýva váš nos, ústa aj bradu.
4. Drôtik na nose zahnite, aby rúško doliehalo k tvári.
5. Nedotýkajte sa rúška počas jeho nosenia.
6. Po použití odstráňte rúško zo zadnej strany (nedotýkajte sa prednej časti rúška) a okamžite ho zlikvidujte v uzavretej nádobe (zmesový odpad).
7. Vyčistite si ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky na báze alkoholu alebo mydlom a vodou.

SKLADOVANIE

V ideálnom prípade by mali byť čisté rúška skladované v uzatvárateľnej plastovej škatuli, ktorá bola pred vložením rúšok uzavretá. Prípadne môžete rúška vložiť do uzatvárateľných plastových vrecúšok.

Nezabudnite však, že by ste mali manipulovať s rúškami s čistými rukami, alebo použiť jednorazové rukavice.

Rúška skladujte na suchom a čistom mieste pri teplotách od -20 do +40 °C.

Krajina pôvodu: Čínska ľudová republika